



# therapist

## Magnetoterapia professionale



- Dispositivo medico professionale per magnetoterapia a campi magnetici pulsati
- Per fratture e trattamenti osteo-articolari
- Tecnologia brevettata: l'unico con solenoide integrato
- Solo 2 programmi a codice variabile, "intelligenti e semplici" per tutti i trattamenti
- Dispositivo all-in-one
- Design iconico e funzionale di dimensioni ridotte
- App dedicata
- Dotato di segnalatore acustico al variare delle funzioni prescelte ed al termine del trattamento

THERAPIST® è un dispositivo medico **brevettato e made in Italy** per la magnetoterapia. Per le sue innovative caratteristiche tecnologiche, concentrate in pochissimo spazio, rappresenta una vera rivoluzione nel contrasto ai dolori, traumi e fratture. A differenza degli altri dispositivi per magnetoterapia complessi da applicare e programmare, THERAPIST® è l'unico con solenoide integrato e che non richiede selezione di programmi specifici. Grazie alle dimensioni tascabili e alla batteria di lunga durata, **può essere portato ovunque** e utilizzato nella massima comodità, anche sopra i vestiti. Non emette rumore né fastidiose vibrazioni.

THERAPIST®, grazie ai suoi 2 programmi con codice variabile, è in grado di **erogare autonomamente la frequenza magnetoterapeutica** più adatta a intercettare la patologia da trattare grazie alla sua tecnologia innovativa e intelligente. THERAPIST® **non necessita di programmazione** ed è quindi semplicissimo da utilizzare. Basta solo "dirgli" se deve trattare **dolori acuti o cronici**, al resto ci pensa lui!

  
**MADE IN ITALY**

  
Magnetoterapia  
a campi magnetici  
pulsati

  
**Tested**  
Potenza  
testata

  
**Patented**  
Tecnologia  
brevettata

## 2 FASCE ELASTICHE

DA POSIZIONARE DIRETTAMENTE  
SULLA ZONA DA TRATTARE,  
SOPRA IL VESTITO O IL GESSO.



Cod. 10592  
THERAPIST®



THERAPIST<sup>®</sup> è munito di **2 programmi** a codice variabile (DOLORE ACUTO - DOLORE CRONICO E PATOLOGIE OSSEE). Diversamente da tutti gli apparecchi per magnetoterapia con programmi a frequenza fissa, questa tecnologia permette di migliorare l'efficacia del trattamento e prolungarne la durata.

### **P1** PROGRAMMA DOLORE ACUTO


- Artrite reumatoide
- Sindrome del tunnel carpale
- Periartriti e Tendiniti
- Lombalgia, Lombosciatalgia e Cervicobrachialgia acuta
- Morbo di Sudeck/Algodistrofia acuta
- Neuropatie acute
- Traumi muscolari o articolari
- Reumatismi muscolari

### **P2** PROGRAMMA DOLORE CRONICO E PATOLOGIE OSSEE

- Artrosi
- Fibromialgia
- Fratture, Malattie dell'osso, Osteoporosi
- Lombalgia, lombosciatalgia e Cervicobrachialgia cronica
- Morbo di Sudeck/Algodistrofia cronica
- Neuropatie croniche
- Traumi muscolari o articolari
- Affaticamento muscolare da sport



**ESEMPI DI APPLICAZIONE:**  
collo, spalla, schiena, ginocchio, gomito

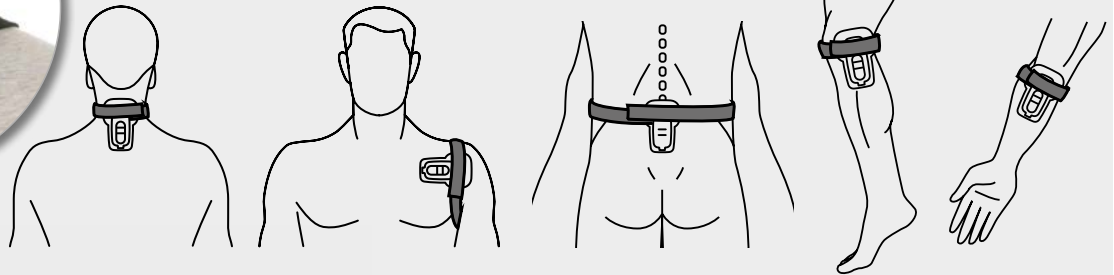

#### **Dotazione**

Unità per magnetoterapia,  
2 fasce elastiche,  
alimentatore, manuale d'uso



Scarica  
la app



## App dedicata

THERAPIST<sup>®</sup>  
è un dispositivo smart!  
Grazie alla sua **app** dialoga con il tuo  
**smartphone** fornendoti in tempo reale tutte  
le informazioni sulla terapia in corso.



## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Alimentatori compatibili:</b>	Mod. SAW20-050-2400GD
<b>Tensione di alimentazione:</b>	100-240 Vac; 50/60 Hz; alimentatore non medicale
<b>Assorbimento:</b>	0,6 A
<b>Tensione di uscita:</b>	5 Vdc 2,4 A
<b>Batteria ricaricabile tipo Li-Pol:</b>	3,7 Vdc 1900 mAh
<b>Tempo ricarica:</b>	4 ore circa
<b>Frequenza di pilotaggio del diffusore (integrato nel dispositivo):</b>	da 5 a 500 [Hz] $\pm 20\%$ .
<b>Intensità magnetica massima (Valore picco)</b>	150 [Gauss] $\pm 20\%$ per canale
<b>Classificazione rispetto all'ingresso di polvere e liquidi:</b>	IP22
<b>Condizioni ambientali di funzionamento:</b>	Temperatura da +5 a +40 °C Umidità relativa da 15% a 93% Pressione da 700 a 1060 hPa
<b>Condizioni ambientali di trasporto e stoccaggio:</b>	Temperatura da -20 a + 60 °C Umidità relativa < 93% Pressione da 700 a 1060 hPa
<b>Tempo necessario affinché il dispositivo sia pronto per l'uso previsto, dalla temperatura minima dichiarata:</b>	30 minuti
<b>Tempo necessario affinché il dispositivo sia pronto per l'uso previsto, dalla temperatura massima dichiarata:</b>	30 minuti
<b>Dimensioni Apparecchio:</b>	138 x 93 x 24 mm
<b>Peso:</b>	350 g

Con riserva di apportare modifiche tecniche.

